

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-97
		Versión: 9
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTAL SABOR MENTA PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	25 g	7702314700685	37702314700686	x 25 Unidades
	40 g	7702314700456	17702314700453	x 8 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	COLOMBIA: Reg. INVIMA N° 2016DM-0000237-R1			
	PERÚ: RUC: 20271470381			
	VENEZUELA: PMP 52.259			
	URUGUAY: Registro M.S.P. N°74789			
INGREDIENTES	Sal Sódica y Cálcica de Polimetilviniliter y Anhídrido Maleico, CMC, Petrolatum, Aceite Mineral, Metilparabeno, Extracto de Caléndula y sabor a Menta.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.S.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Pasta viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Crema, característico
OLOR	Menta, según estándar
SABOR	Menta, según estándar
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
GRAVEDAD ESPECÍFICA	Informativa
VISCOSIDAD	1.500 cP – 5.500 cP
TORQUE	20,0 % – 80,0 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Crema adhesiva para fijar prótesis dentales. - Sabor a menta. - Protege tus encías. - Con extracto de Caléndula. - Efectiva en prótesis húmedas. - Clínicamente comprobado. - Más de 12 horas de fijación. * <p>*Prueba realizada en laboratorio, bajo condiciones controladas.</p>
MODO DE EMPLEO	Lave la prótesis dental, aplique tres pequeñas porciones del adhesivo en la parte posterior y frontal de la prótesis, no demasiado cerca de los bordes, para evitar desborde. La primera vez aplique una pequeña cantidad. Utilice más si es necesario. Aplique la crema de acuerdo con su necesidad hasta encontrar la cantidad adecuada de adhesivo. Coloque la prótesis correctamente

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-97
		Versión: 9
		Página 2 de 2

	<p>en la boca y presione por varios segundos para garantizar una adherencia correcta.</p> <p>Para retirar la prótesis: Enjuague su boca con agua tibia retire la prótesis con un movimiento suave. Remueva los residuos de adhesivo de la prótesis con el <i>Cepillo para prótesis Proquident</i>. Para mayor limpieza lave la prótesis con <i>Limpiador para aparatos de ortodoncia, prótesis y cepillos dentales Proquident</i>.</p>
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Una vez utilizado el producto y para evitar que la punta se obstruya, el tubo debe permanecer cerrado, asegurar que la tapa y boquilla esté limpia y seca. Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor a 30°C, exceso de luz, calor o humedad por periodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se deben agregar ingredientes que alteren la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Si observa alguna reacción alérgica o de hipersensibilidad, suspenda su uso y visite al odontólogo.
MATERIAL DE EMPAQUE	Tubo colapsible ABL con tapa en PP.