

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-97
		Versión: 5
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTAL SABOR MENTA PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	25 g	7702314700685	37702314700686	x 25 Unidades
	40 g	7702314700456	17702314700453	x 8 Unidades
	Oferta 2 x 40 g	7702314700784	17702314700781	x 12 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2016DM-0000237-R1			
INGREDIENTES	Sal Sódica y Cálcica de Polimetilvinileter y Anhídrido Maleico, CMC Petrolatum, Aceite Mineral, Metilparabeno, Extracto de Caléndula y sabor a Menta.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.90.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Pasta viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Crema, característico
OLOR	Menta, según estándar
SABOR	Menta, según estándar
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
GRAVEDAD ESPECÍFICA	NORMATIVA
VISCOSIDAD	1.500 – 5.500 cP
TORQUE	20,0 % – 80,0 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	- Crema adhesiva para fijar prótesis dentales. - Sabor a menta. - Protege tus encías. - Con extracto de Caléndula. - Efectiva en prótesis húmedas. - Clínicamente comprobado. - 12 horas de fijación.
MODO DE EMPLEO	Lave la prótesis dental, aplique tres pequeñas porciones del adhesivo en la parte posterior y frontal de la prótesis, no demasiado cerca de los bordes, para evitar desborde. La primera vez aplique una pequeña cantidad. Utilice más si es necesario. Aplique la crema de acuerdo con su necesidad hasta encontrar la cantidad adecuada de adhesivo. Coloque la prótesis correctamente en la boca y presione por varios segundos para

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-97
		Versión: 5
		Página 2 de 2

	garantizar una adherencia correcta. Una vez utilizado el producto, limpiar la boca del tubo y tape. Para retirar la prótesis: Enjuague su boca con agua tibia y retire la prótesis con un movimiento suave. Remueva los residuos de adhesivo de la prótesis con el <i>Cepillo para prótesis Proquident</i>. Para mayor limpieza lave la prótesis con <i>Limpiador para aparatos de ortodoncia, prótesis y cepillos dentales Proquident</i>.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener el recipiente bien cerrado y en un lugar seco y fresco. Conservar la tapa siempre seca. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor a 30°C, exceso de luz, calor o humedad por periodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto. Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se deben agregar ingredientes que alteren la composición del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Si observa alguna reacción alérgica o de hipersensibilidad, suspenda su uso y visite al odontólogo.
MATERIAL DE EMPAQUE	Tubo colapsible ABL con tapa en PP.