

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | Código: GC-FT-182 |
| | | Versión: 12 |
| | | Página 1 de 2 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO | CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTAL SIN SABOR PROQUIDENT | | | |
| PRESENTACIÓN COMERCIAL | CONTENIDO | EAN 13 | EAN 14 | UND EMPAQUE |
| | 25 g | 7702314700678 | 37702314700679 | x 25 Unidades |
| | 40 g | 7702314700449 | 17702314700446 | x 8 Unidades |
| NOTIFICACIÓN SANITARIA | COLOMBIA: Reg. INVIMA N° 2016DM-0000237-R1 | | | |
| | PERÚ: RUC: 20271470381 | | | |
| | VENEZUELA: PMP 52.259 | | | |
| | URUGUAY: Registro M.S.P. N°74789 | | | |
| INGREDIENTES | Sal Sódica y Cálcica de Polimetilviniléter y Anhídrido Maleico, CMC, Petrolatum, Aceite Mineral, Metilparabeno, Extracto de Caléndula. | | | |
| TIEMPO DE VIDA ÚTIL | 3 años | | | |
| FABRICANTE | Proquident S.A.S. | | | |

| CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | ESPECIFICACIONES |
|--|--|
| ASPECTO | Pasta viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas |
| COLOR | Crema, característico |
| OLOR | Inoloro |
| SABOR | Insaboro |
| CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | ESPECIFICACIONES |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | Informativa |
| VISCOSIDAD | 1.500 cP – 5.500 cP |
| TORQUE | 20,0 % – 80,0 % |
| CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | ESPECIFICACIONES |
| NO APLICA | |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
|---------------------------------|--|
| PROCLAMAS | <ul style="list-style-type: none"> - Crema adhesiva para fijar prótesis dentales. - Sin sabor adicionado. - Protege tus encías. - Con extracto de Caléndula. - Efectiva en prótesis húmedas. - Clínicamente comprobado. - Más de 12 horas de fijación. * <p>*Prueba realizada en laboratorio, bajo condiciones controladas.</p> |
| MODO DE EMPLEO | Lave la prótesis dental, aplique tres pequeñas porciones del adhesivo en la parte posterior y frontal de la prótesis, no demasiado cerca de los bordes, para evitar desborde. La primera vez aplique una pequeña cantidad. Utilice más si es necesario. Aplique la crema de acuerdo a su necesidad hasta encontrar la cantidad adecuada de adhesivo. Coloque la prótesis correctamente |

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Proquident [®] | FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO | Código: GC-FT-182 |
| | | Versión: 12 |
| | | Página 2 de 2 |

| | |
|--|---|
| | <p>en la boca y presione por varios segundos para garantizar una adherencia correcta.</p> <p>Para retirar la prótesis: Enjuague su boca con agua tibia retire la prótesis con un movimiento suave. Remueva los residuos de adhesivo de la prótesis con el <i>Cepillo para prótesis Proquident</i>. Para mayor limpieza lave la prótesis con <i>Limpiador para aparatos de ortodoncia, prótesis y cepillos dentales Proquident</i>.</p> |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | <p>Una vez utilizado el producto y para evitar que la punta se obstruya, el tubo debe permanecer cerrado, asegurar que la tapa y boquilla esté limpia y seca. Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor a 30°C, exceso de luz, calor o humedad por periodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se deben agregar ingredientes que alteren la composición del producto.</p> |
| PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES | Si observa alguna reacción alérgica o de hipersensibilidad, suspenda su uso y visite al odontólogo. |
| MATERIAL DE EMPAQUE | Tubo colapsible ABL con tapa en PP. |