

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	CREMA ADHESIVA DE PROTESIS DENTAL SIN SABOR PROQUIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	40 g	7702314700449	17702314700446	x 8 unidades
	25 g	7702314700678	37702314700679	X 25 unidades
	Oferta 2 x 40 g	7702314700524	17702314700521	x 12 unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	2016DM-0000237-R1			
<b>INGREDIENTES</b>	Calendula Officinalis Leaf/stem Extract, Petrolatum, Paraffinum liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Methylparaben, Cellulose Gum			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3 años			
<b>FABRICANTE</b>	Proquident S.A.			
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	3306.90.00.00			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Pasta viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Crema característico
OLOR	Inoloro
<b>CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
GRAVEDAD ESPECÍFICA	Informativa
VISCOSIDAD	1.500 – 5.500 cP
TORQUE	20,0% – 80,0%
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
No aplica	

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Crema adhesiva para fijar prótesis dental.</li> <li>- Sin sabor adicionado.</li> <li>- Protege tus encías.</li> <li>- Con extracto de caléndula.</li> <li>- Efectiva en prótesis húmedas.</li> <li>- Clínicamente comprobado.</li> <li>- 12 horas de fijación.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>Lave la prótesis dental, aplique tres pequeñas porciones del adhesivo en la parte posterior y frontal de la prótesis, no demasiado cerca de los bordes, para evitar desborde. La primera vez aplique una pequeña cantidad. Utilice más si es necesario. Aplique la crema de acuerdo a su necesidad hasta encontrar la cantidad adecuada de adhesivo. Coloque la prótesis correctamente en la boca y presione por varios segundos para garantizar una adherencia correcta. Una vez utilizado el producto, limpiar la boca del tubo y tape.</p>

<b>Proquident</b> <sup>®</sup>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-182
		Versión: 8
		Página 2 de 2

	<p><b>Para retirar la prótesis:</b> Enjuague su boca con agua tibia retire la prótesis con un movimiento suave. Remueva los residuos de adhesivo de la prótesis con el cepillo para prótesis Proquident. Para mayor limpieza lave la prótesis con limpiador para aparatos de ortodoncia, prótesis y cepillos dentales Proquident.</p>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Mantener el recipiente bien cerrado y en un lugar seco y fresco. Conservar la tapa siempre seca. Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor a 30°C, exceso de luz, calor o humedad por periodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto. Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se deben agregar ingredientes que altere la composición del producto.</p>
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	<p>Si observa alguna reacción alérgica o de hipersensibilidad suspender su uso y visite al odontólogo.</p>
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	<p>Tubo colapsible ABL con tapa en PP.</p>