

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-182
		Versión: 10
		Página 1 de 2


NOMBRE DEL PRODUCTO	CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTAL SIN SABOR PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	25 g	7702314700678	37702314700679	x 25 Unidades
	40 g	7702314700449	17702314700446	x 8 Unidades
	Oferta 2 x 40 g	7702314700524	17702314700521	x 12 Unidades
	25 g Exportación	7702314701040	37702314701041	x 72 Unidades
	40 g Exportación	7702314701057	37702314701058	x 70 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	COLOMBIA: Reg. INVIMA N° 2016DM-0000237-R1			
	PERÚ: RUC: 20271470381			
	VENEZUELA: Rif: J-40123283-0			
	URUGUAY: Registro M.S.P. N°74789			
INGREDIENTES	Sal Sódica y Cálcica de Polimetilviniliter y Anhídrido Maleico, CMC, Petrolatum, Aceite Mineral, Metilparabeno, Extracto de Caléndula.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.90.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Pasta viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Crema, característico
OLOR	Inoloro
SABOR	Insaboro
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
GRAVEDAD ESPECÍFICA	Informativa
VISCOSIDAD	1.500 cP – 5.500 cP
TORQUE	20,0 % – 80,0 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Crema adhesiva para fijar prótesis dentales. - Sin sabor adicionado. - Protege tus encías. - Con extracto de Caléndula. - Efectiva en prótesis húmedas. - Clínicamente comprobado. - Más de 12 horas de fijación. *

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-182
		Versión: 10
		Página 2 de 2

	<p>*Prueba realizada en laboratorio, bajo condiciones controladas.</p>
MODO DE EMPLEO	<p>Lave la prótesis dental, aplique tres pequeñas porciones del adhesivo en la parte posterior y frontal de la prótesis, no demasiado cerca de los bordes, para evitar desborde. La primera vez aplique una pequeña cantidad. Utilice más si es necesario. Aplique la crema de acuerdo a su necesidad hasta encontrar la cantidad adecuada de adhesivo. Coloque la prótesis correctamente en la boca y presione por varios segundos para garantizar una adherencia correcta.</p> <p>Para retirar la prótesis: Enjuague su boca con agua tibia retire la prótesis con un movimiento suave. Remueva los residuos de adhesivo de la prótesis con el <i>Cepillo para prótesis Proquident</i>. Para mayor limpieza lave la prótesis con <i>Limpiador para aparatos de ortodoncia, prótesis y cepillos dentales Proquident</i>.</p>
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Una vez utilizado el producto y para evitar que la punta se obstruya, el tubo debe permanecer cerrado, asegurar que la tapa y boquilla esté limpia y seca. Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor a 30°C, exceso de luz, calor o humedad por periodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se deben agregar ingredientes que alteren la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Si observa alguna reacción alérgica o de hipersensibilidad, suspenda su uso y visite al odontólogo.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	<p>Tubo colapsible ABL con tapa en PP.</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com