

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-27
		Versión: 5
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	DENTAFLÚOR GEL NEUTRO PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 50 g	7702314250616	37702314250617	x 40 Unidades
	x 1000 g	7702314250708	17702314250705	x 6 Unidades
	x 3800 g	7702314250715	17702314240712	x 6 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2021DM-0007302-R1			
INGREDIENTES	Agua, Citrato de potasio, Sorbitol, Fluoruro de sodio, Glicerina, Sabor a menta, Metilparabeno sódico, Ácido cítrico, Fosfato monosódico, Sacarina sódica y color.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.90.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Gel viscoso, uniforme, textura suave, libre de materias extrañas
COLOR	Verde claro
OLOR	Característico a Menta
SABOR	Menta
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	6,50 – 7,50
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0213 – 1,1167
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Fluoruro de Sodio 2,0 % (9047 ppm de Flúor)
	Citrato de potasio 5,6 %
VISCOSIDAD	15000 cP – 90000 cP
TORQUE	20,0 % – 80,0 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Gel neutro - Desensibilizante
MODO DE EMPLEO	Aislar los dientes utilizando algodón en rollo y color eyector, aplicar solo en las superficies dentales durante máximo 4 minutos, retirar con gasa o algodón en rollo.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-27
		Versión: 5
		Página 2 de 2

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>No ingerir el producto. Evitar el consumo de alimentos y bebidas hasta 1 hora después de aplicado el gel.</p> <p>Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y a una temperatura menor a 30°C.</p> <p>En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. Evitar el contacto directo con las mucosas, mantener bien tapado.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase PEAD por 50 g, 500 y 3800 mL (3,8 L).