

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-13
		Versión: 6
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	GLUTACIDES PLUS +			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	375 mL	7702314240365	17702314240362	x 6 unidades
	1000 mL	7702314240372	17702314240379	x 6 unidades
	3800 mL	7702314240358	17702314240355	x 6 unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2022DM-0025752			
INGREDIENTES	Glutaraldehído 2%, Anticorrosivo, Aroma limón.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3808.94.19.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS – SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Solución homogénea traslúcida, libre de partículas extrañas
COLOR	Incoloro
OLOR	Limón, según estándar
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS – SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO	ESPECIFICACIONES
pH	3,60 – 4,60
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0009 – 1,0919
CONTENIDO DE GLUTARALDEHÍDO	2,00 – 2,35 %
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS – SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO CON SOLUCIÓN ACTIVADORA	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Solución homogénea traslúcida, libre de partículas extrañas
COLOR	Azul claro, según estándar
OLOR	Limón, según estándar
pH	3,70 – 4,70

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Glutaraldehído al 2%. - Desinfectante de alto nivel. - Aroma limón. - 45 días activado. - Desinfección instrumental. - Con agente anticorrosivo. - Alta desinfección en 20 minutos. - Biodegradable.
MODO DE EMPLEO	Lave el instrumental, según protocolo aprobado. Agregar al envase el contenido de la solución activadora, marcar la fecha de expiración.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-13
		Versión: 6
		Página 2 de 2

	Sumerja el instrumental lavado en la solución y tape el recipiente. Deje en inmersión por 20 minutos si se va a desinfectar o para esterilizar dejar mínimo 8 horas. Enjuague y seque el instrumental.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Mantener el recipiente bien cerrado y lejos del alcance de los niños. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas tales como temperaturas mayores a 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por periodos prolongados.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase PEAD blanco con tapa rosca PP.

Copia no controlada