

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO		Código: GC-FT-13
			Versión: 8
			Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	GLUTACIDES PLUS +			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	375 mL	7702314240365	17702314240362	x 6 unidades
	1000 mL	7702314240372	17702314240379	x 6 unidades
	3800 mL	7702314240358	17702314240355	x 6 unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2022DM-0025752			
DESCRIPCIÓN	GLUTACIDES PLUS es un desinfectante de alto nivel que contiene glutaraldehído al 2%, un agente químico de acción lenta que inhibe la fijación de los microorganismos y su proceso nutricional debido que ataca directamente las proteínas y su actuar. Es conocido por su amplio espectro antibacterial, antifúngico, esporicida y virucida (en virus sin cubierta).			
COMPOSICIÓN	Ingrediente activo: Glutaraldehído 2% Ingredientes auxiliares: Agente anticorrosivo, reguladores de pH y aroma limón.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años (36 meses).			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3808.94.19.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS – SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Solución homogénea traslúcida, libre de partículas extrañas
COLOR	Incoloro
OLOR	Limón, según estándar
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS – SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO	ESPECIFICACIONES
pH	3,60 – 4,60
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0009 – 1,0919
CONTENIDO DE GLUTARALDEHÍDO	2,00 – 2,35 %
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS – SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO CON SOLUCIÓN ACTIVADORA	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Solución homogénea traslúcida, libre de partículas extrañas
COLOR	Azul claro, según estándar
OLOR	Limón, según estándar
pH	3,70 – 4,70

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	- Glutaraldehído al 2%. - Con agente anticorrosivo. - Desinfectante de alto nivel. - Desinfección de instrumental y pecuaria.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-13
		Versión: 8
		Página 2 de 2

	- Alta desinfección en 20 minutos. - 45 días activado. - Aroma limón. - Biodegradable.
MODO DE EMPLEO	- Use elementos de protección personal (EPP). - Agregue todo el contenido del activador a la solución principal y agite fuertemente. Anote la fecha de expiración, que corresponde a 45 días después de la activación. - Lave los instrumentos, según el protocolo aprobado, con detergente, enjuague muy bien. - Sumerja los instrumentos lavados en la solución, de tal manera que queden totalmente cubiertos y tape el recipiente. Deje en inmersión por 20. - Enjuague los instrumentos con agua potable o agua destilada y utilice en el menor tiempo posible, y luego secarlos muy bien. - No se recomienda reutilizar. - No se recomienda aspersión directa debido a su toxicidad por vía respiratoria.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener en sitios aireados, frescos, secos y alejados de la luz solar directa. Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se deben mezclar con agua ni otros componentes diferentes al activador suministrado por Proquident.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	- Mantener el recipiente bien cerrado y lejos del alcance de los niños. - No mezclar con otros productos. - No ingerir. - Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas tales como temperaturas mayores a 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por periodos prolongados.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase PEAD blanco con tapa rosca PP.