

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-14
		Versión: 4
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	GOTAS REVELADORAS DE PLACA BACTERIANA PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	5 mL	7702314142027	37702314142028	x 100 Unidades
	10 mL	Blíster Adulto: 7702314142010	17702314142017	x 12 Unidades
		Blíster Kids: 7702314142041	17702314142048	x 12 Unidades
		Granel: 7702314342007	37702314342008	x 30 Unidades
	1000 mL	7702314342014	17702314342011	x 6 Unidades
	3800 mL	7702314342038	17702314342035	x 6 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2019DM-0019524			
INGREDIENTES	Agua, Sorbitol, Glicerina, Eritrosina Sódica 2%, Metilparabeno, Sacarina Sódica y Sabor.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3204.20.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido homogéneo opaco, libre de partículas extrañas
COLOR	Rojo, según estándar
OLOR	Característico a fresa
SABOR	Fresa, según estándar
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	8,00 – 9,50
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0255 – 1,0528
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Eritrosina Sódica 2%
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL o g
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL o g
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Detecta la placa bacteriana que se forma en la superficie de los dientes y lengua.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-14
		Versión: 4
		Página 2 de 2

MODO DE EMPLEO	<ul style="list-style-type: none"> - Colocar dos gotas sobre la lengua. Desplazar el revelador por todas las superficies dentarias y dejar actuar 30 segundos. - La aparición de manchas rojas sobre los dientes y lengua, indican la presencia de placa bacteriana. - Cepilla nuevamente los dientes, usando Cepillo y Seda Dental Proquident.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Remueva las manchas rojas con el cepillo y la seda dental Proquident. Lávese nuevamente.
MATERIAL DE EMPAQUE	Lávese en PEAD

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com