

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-15
				Versión: 6
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	HEMOSTÁTICO PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	15 mL	7702314230519	37702314230510	x 32 unidad
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2020DM-0021631			
INGREDIENTES	Sulfato Férrico 13%, Sorbitol, Agua. Puede contener color y sabor.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	2833.29.10.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido homogéneo translúcido, libre de partículas extrañas
COLOR	Caramelo, según estándar
OLOR	Inoloro
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	Ácido al papel indicador
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0616 – 1,3170
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	11,7% – 14,3% de Sulfato Férrico
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<p>Para el control del sangrado durante los procesos operativos dentales en los cuales este se puede presentar, como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconstrucción dental. - Reparación de coronas dentales. - Antes de tomar una impresión (con el fin de tener seca el área que rodea el diente). - Exodoncias. <p>- No contiene epinefrina.</p> <p>- Cicatrizante, antiinflamatorio y antihemorrágico.</p> <p>- Aplicación tópica en el área afectada. Se puede aplicar con o sin dentodifusor (jeringa).</p>
MODO DE EMPLEO	Impregnar una torunda de algodón (húmeda mas no empapada) y aplicar en el área afectada (gingival o alvéolo) hasta que la hemorragia cese. En caso de que, transcurridos 8 minutos de sangrado, este persista remitir al médico.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-15
		Versión: 6
		Página 2 de 2

	<p>propias del producto. Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - No ingerir. - Su aplicación debe ser bajo supervisión profesional. - Proteger piezas adyacentes en el momento de la aplicación para evitar manchado de tejidos duros. - Las sales férricas pueden llegar a ser irritantes e incluso corrosivas. - Proteger de la luz. - Manténgase fuera del alcance de los niños.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase de vidrio ámbar por 15 mL provisto de gotero dosificador.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com