

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA			Código: GC-FT-15
	PRODUCTO TERMINADO			Versión: 9
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	HEMOSTÁTICO PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	15 mL	7702314230519	37702314230510	x 32 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2020DM-0021631			
INGREDIENTES	Solución de sulfato férrico 13%, excipientes.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.S.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido homogéneo traslúcido, libre de partículas extrañas
COLOR	Caramelo, según estándar
OLOR	Inoloro
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	Ácido al papel indicador
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0616 – 1,3170
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	11,7% – 14,3% de Sulfato Férrico
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Libre de Epinefrina - Uso odontológico
MODO DE EMPLEO	Para el control del sangrado durante los procesos operativos dentales en los cuales este se pueda presentar, como lo son: Reconstrucción dental, preparación de coronas dentales y exodoncias. Útil antes de tomar impresiones dentales, con el fin de secar el área que rodea el diente. Eliminar posteriormente el producto, enjuagando suavemente, una vez se efectúe la hemostasis.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-15
		Versión: 9
		Página 2 de 2

	Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Utilizar guantes, gafas de seguridad, protección respiratoria y prendas adecuadas para su manipulación. Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños. CONTRAINDICADO EN CASOS DE HEMORRAGIA SEVERA.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase de vidrio ámbar por 15 mL provisto de gotero dosificador.

Copia no controlada