

Proquident	FICHA TÉCNICA	Código: GC-FT-107
	PRODUCTO TERMINADO	Versión: 4
		Página 1 de 9

NOMBRE DEL PRODUCTO	KIT DE ORTODONCIA EN BLÍSTER PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	CREMA DENTAL *	7702314180241	17702314180248	x 10 Unidades
	- Adultos Sonrident x 25mL			
	- Anticaries Proquident x25mL			
	- Dientes sensibles blanqueadora Proquident x 25 mL			
	Cepillo dental para ortodoncia			
	Gotas reveladoras x 5mL			
	Seda dental con cera x 12 metros			
Cera para ortodoncia				
Cepillo interproximal viajero				
Enhebradores plástico				
Estuche				
*CONTIENE SÓLO UNA DE LAS TRES CREMAS, SEGÚN DISPONIBILIDAD				
NOTIFICACIÓN SANITARIA	Crema dental Sonrident y Crema dental Anticaries	NSOC49049-12CO		
	Crema dental dientes sensibles	NSOC80243-17CO		
	Cepillo dental para ortodoncia	2017DM-0001210-R1,		
	Gotas reveladoras	2019DM-0019524		
	Seda dental con cera	2017DM-0016095		
	Cepillo interproximal viajero.	2017DM-0001210-R1		
	Enhebradores plásticos	N.º 2010014709, no requiere Registro Sanitario		
	Estuche	NO APLICA		
INGREDIENTES	Crema dental Adultos Sonrident	Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate, Cellulose, Aroma, Sodium Saccharin, Menthol, Sodium fluoride, Titanium dioxide, Sodium Benzoate, Eugenol, Sodium Bicarbonate.		
	Crema dental dientes Sensibles	Sorbitol, Aqua, Glycerin, Hydrate Silica, Potassium Citrate, Pentasodium Triphosphate, Sodium Lauryl Sulfate, PEG-12, Aroma, Titanium dioxide, Sodium		

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-107
		Versión: 4
		Página 2 de 9

		Floride, Menthol, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Decyl Glucoside.
	Cepillo dental para ortodoncia	Cepillo de polipropileno con cerdas blancas de nylon dupont tynex.
	Gotas reveladoras	Aqua, Sorbitol, Glycerin, Sodium erythrosine, Methylparaben, Sodium saccharin, Sabor
	Seda dental con cera	Nylon, Wax, Aroma, Menthol, Sucralose.
	Cera para ortodoncia	Wax, Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopherol, Aloe.
	Cepillo interproximal viajero	Poliestireno y alambre inoxidable recubierto con poliuretano.
	Enhebradores plásticos	Nylon (filamento) de plástico en forma de ojal de un sólo filamen.
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años	
FABRICANTE	Proquident S.A.	
PARTIDA ARANCELARIA	Crema Dental	3306.10.00.00
	Cepillo dental para ortodoncia	9603.21.00.00
	Gotas reveladoras	3204.20.00.00
	Seda dental con cera	3306.20.00.00
	Cera para ortodoncia	3407.00.20.00
	Cepillo Interproximal	9018.49.10.00
	Enhebradores plásticos	3306.90.00.00

CREMA DENTAL ADULTOS SONRIDENT	
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Crema viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Blanco
OLOR	Característico a Menta
SABOR	Menta
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	6,5 - 8,5
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0000 - 1,4000
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Fluoruro de Sodio 0,321 % (1452 PPM de Flúor)
VISCOSIDAD A 24°C (TORQUE %)	80000 cP – 200000 cP, Aguja N.º 07 a 10 RPM (20 % – 80 %)
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL
HONGOS, MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-107
		Versión: 4
		Página 3 de 9

<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Crema dental Anticaries con Flúor. - Aliento fresco. - Fortalece el esmalte de los dientes. - Disminuye la formación de sarro dental.
MODO DE EMPLEO	Cepillar los dientes tres veces al día, después de cada comida o según recomendación del odontólogo, no ingerir. Enjuagar completamente después del cepillado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a una temperatura menor a 30 °C y evitar la exposición directa a la luz solar.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua. Suspenda su uso en caso de reacción desfavorable. Uso externo.
MATERIAL DE EMPAQUE	Tubo colapsible ABL con tapa PP.

CREMA DENTAL DIENTES SENSIBLES BLANQUEADORA	
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Crema viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Blanco
OLOR	Característico a Menta
SABOR	Menta
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	6,5 - 8,5
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0000 - 1,4000
CONCENTRACIÓN PRINCIPAL ACTIVO	Fluoruro de Sodio 0,321 % (1452 PPM de Flúor)
VISCOSIDAD A 24°C (TORQUE %)	80000 cP – 190000 cP, Aguja N.º 07 a 10 RPM (20 % – 80 %)
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL
HONGOS, MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Con citrato de potasio y flúor. - Máximo alivio.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-107
		Versión: 4
		Página 4 de 9

	<ul style="list-style-type: none"> - Protección anticaries. - Ayuda a remover manchas. - Dientes más blancos y brillantes. - Alivio de la sensibilidad dental. - Sabor a menta.
MODO DE EMPLEO	Cepillar los dientes tres veces al día, después de cada comida o según recomendación del odontólogo, no ingerir. Enjuagar completamente después del cepillado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a una temperatura menor a 30°C y evitar la exposición directa a la luz solar.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	No ingerir. Recomendada para mayores de 6 años. Si presenta alguna reacción consulte con su odontólogo. Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
MATERIAL DE EMPAQUE	Tubo colapsible ABL con tapa PP.

CREMA DENTAL ANTICARIES	
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Crema viscosa homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Blanco con micropartículas verdes
OLOR	Característico a Menta
SABOR	Menta
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	6,0 - 9,0
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0000 - 1,4000
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Fluoruro de Sodio 0,321 % (1452 PPM de Flúor)
VISCOSIDAD A 24°C (TORQUE 5%)	80000 cP – 200000 cP, Aguja N.º 07 a 10 RPM (20 % – 80 %)
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL
HONGOS, MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Crema dental Anticaries con Flúor. - Aliento fresco. - Fortalece el esmalte de los dientes. - Disminuye la formación de sarro dental.

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-107
		Versión: 4
		Página 5 de 9

MODO DE EMPLEO	Cepillar los dientes tres veces al día, después de cada comida o según recomendación del odontólogo, no ingerir. Enjuagar completamente después del cepillado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a una temperatura menor a 30°C y evitar la exposición directa a la luz solar.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua. Suspender su uso en caso de reacción desfavorable. Uso externo.
MATERIAL DE EMPAQUE	Tubo colapsible ABL con tapa PP.

GOTAS REVELADORAS	
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido homogéneo opaco, libre de partículas extrañas.
COLOR	Rojo
OLOR	Característico
SABOR	Fresa
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	8,0 - 9,5
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0255 - 1,0523
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Eritrosina sódica 2%
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL
HONGOS, MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Detecta la presencia de placa bacteriana, la cual se tiñe de rojo al ponerse en contacto con el colorante.
MODO DE EMPLEO	Colocar dos gotas sobre la lengua. Desplazar el revelador por todas las superficies dentarias y dejar actuar por cerca de 30 segundos. La aparición de manchas rojas sobre dientes y lengua, indica la presencia de placa bacteriana. Cepillar nuevamente los dientes usando cepillo o seda dental. No ingerir.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a una temperatura menor a 30 °C y evitar la exposición directa a la luz solar.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	No ingerir. Remueva las manchas rojas con el cepillo y la seda dental Proquident.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-107
		Versión: 4
		Página 6 de 9

MATERIAL DE EMPAQUE	Envase en PEAD.
----------------------------	-----------------

CEPILLO DENTAL		
ASPECTO	Cepillo de polipropileno con cerdas blancas de Nylon Dupont Tynex, mango traslúcido marcado con el logo de Proquident en colores surtidos. Cerdas internas más cortas que las externas.	
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia	
TEXTURA DE LAS CERDAS	Media	
DIMENSIONES	Orificios en la cabeza	33 agujeros
	Filamentos por agujero	16 - 19 filamentos
	Altura de las cerdas	8.0 0mm ± 0.50mm
	Largo total	175mm ± 1mm
USOS	Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental. Cerdas en CORTE V para eliminar la placa alrededor de los brackets. Palillo de goma para una mejor limpieza.	

SEDA DENTAL	
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Cinta de teflón debidamente bien embobinado que no se debe deshilachar durante su manipulación.
COLOR	Blanco
SABOR	Menta
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
PORCENTAJE DE PARAFINA Y MENTA	Mínimo 12%
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 5000 UFC/ mL
HONGOS, MOHOS Y LEVADURAS	< 5000 UFC/ mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Con cera. - Sabor a Menta
MODO DE EMPLEO	Cortar aproximadamente 40 cm de cinta, enrollar en el dedo medio o del corazón la mayor cantidad de seda e ir enrollando la seda utilizada en el dedo medio de la otra mano. Haga pasar la seda

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA	Código: GC-FT-107
	PRODUCTO TERMINADO	Versión: 4
		Página 7 de 9

	entre diente y diente usando los dedos pulgar e índice. Repita la operación anterior con nuevo tramo de cinta dental de teflón
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Mantener fuera del alcance de los niños. El uso en niños debe ser supervisado por un adulto.
MATERIAL DE EMPAQUE	Estuche plástico en PP, burbuja plástica PET y respaldo de cartón.

CERA PARA ORTODONCIA	
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Barra de cera lisa y suave al tacto
COLOR	Blanco a amarillo pálido
OLOR	Característico a cera
SABOR	Insaboro
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
ALTURA DE LA BARRA	5 cm
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Mezcla de ceras, Caléndula, Vitamina E, Aloe vera.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Regenera la superficie maltratada por el tratamiento de ortodoncia.
MODO DE EMPLEO	La <i>Cera para ortodoncia Proquident</i> , evita laceraciones y heridas ocasionados por los aparatos de ortodoncia en los tejidos blandos de la boca. Retire una <i>Barra de ortodoncia Proquident</i> , corte pequeños trozos y adhiéralos a cada una de las piezas (Brackets) donde se siente la molestia.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Conserve en un lugar fresco y seco. Se recomienda mantener siempre los productos en su empaque original.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Mantenga fuera del alcance de los niños. Uso externo. El uso en niños debe estar supervisado por un adulto.
MATERIAL DE EMPAQUE	Cartulina + PET transparente.

CEPILLO INTERPROXIMAL	
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-107
		Versión: 4
		Página 8 de 9

ASPECTO	Cepillo interproximal con mango de polipropileno con cerdas blancas colocadas en forma cónica homogéneas y alambre inoxidable recubierto con poliuretano.	
COLOR	Azul y blanco	
SABOR	NO APLICA	
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS		ESPECIFICACIONES
TEXTURA DE LAS CERDAS	Suave	
DIMENSIONES	Calibre del alambre	0,31 mm
	Diámetro de la cabeza	3,00 mm ± 0,25 mm
	Largo de la cabeza	12,40 mm ± 0,40 mm
	Largo total del cepillo	15,50 mm ± 0,50 mm
	Largo del	50,00 mm ± 0,20 mm
	Largo total sin tapa	65,30 mm ± 0,30 mm
	Diámetro de la base del mango	6,70 mm ± 0,02 mm
	Largo de la tapa	52,30 mm ± 0,40 mm
Largo total con tapa	74,50 mm ± 0,50 mm	
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		ESPECIFICACIONES
NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Cepillo interproximal individual viajero diseñado para una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental, especialmente en personas sometidas a tratamientos de ortodoncia.
MODO DE EMPLEO	Para su correcto uso, debe desplazarse desde afuera hacia adentro en las paredes interproximales. Por la forma como vienen presentados, puede usarse con o sin mango.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Conserve en un lugar fresco y seco. Se recomienda mantener siempre los productos en su empaque original.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Mantenga fuera del alcance de los niños. Uso externo. Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada dos meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo. Si nota alguna reacción extraña en su cavidad oral, suspender inmediatamente su uso, y consultar con su odontólogo de confianza.
MATERIAL DE EMPAQUE	Cartón con burbuja plástica PET.

ENHEBRADORES	
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-107
		Versión: 4
		Página 9 de 9

ASPECTO		Nylon (filamento) de plástico en forma de ojal de un sólo filamen.
COLOR		Azul
OLOR		Inoloro
SABOR		Insaboro
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS		ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES	Ojal	10,2 cm o 102 mm
	Tallo	1 cm o 10 mm
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		ESPECIFICACIONES
NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	Diseñado para facilitar el paso de la seda dental por lugares de difícil acceso como debajo de los puentes fijos, entre aparatos ortodónticos o entre dientes hundidos y ferulados.
MODO DE EMPLEO	Insertar en el enhebrador la seda dental, introducirlos por los espacios interproximales, retirar el enhebrador dejando la seda en el espacio para usarla.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Conserve en un lugar fresco y seco. Se recomienda mantener siempre los productos en su empaque original.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Úselo después de cada comida como complemento en la higiene bucal. Consulta con su odontólogo regularmente.
MATERIAL DE EMPAQUE	Cartulina + PET transparente.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com