

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-113
		Versión: 6
		Página 1 de 11

NOMBRE DEL PRODUCTO		KIT DE ORTODONCIA ECONÓMICO PROQUIDENT		
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	*Crema Dental Adultos Sonrident x 25 mL x 1 Unidad	7702314180536	17702314180583	x 8 Unidades
	*Crema Dental Anticaries Proquident x 25 mL x 1 Unidad			
	*Crema Dental con Flúor Sensitive Proquident x 25 mL x 1 Unidad			
	*Crema Dental Adultos Naturals Proquident x 25 mL			
	Cepillo Dental para Ortodoncia x 1 Unidad			
	Seda Dental Con Cera x 12 Metros x 1 Unidad			
	Cera para ortodoncia			
	Cepillo Interproximal Viajero			
	Estuche x 1 Unidad			
*CONTIENE <b>SÓLO UNA</b> DE LAS TRES CREMAS, SEGÚN DISPONIBILIDAD.				
NOTIFICACIÓN SANITARIA	Crema Dental Adultos Sonrident x 25 mL	NSOC22464-23CO		
	Crema Dental Anticaries Proquident x 25 mL	NSOC22464-23CO		
	Crema Dental con Flúor sensitive Proquident x 25 mL	NSOC22258-23CO		
	Crema Dental Adultos Naturals Proquident x 25 mL	NSOC71571-16CO		
	Cepillo Dental para ortodoncia	2017DM-0001210-R1		
	Seda Dental	2017DM-0016095		
	Cera para Ortodoncia	Proveedor Bondent	2017DM-0017443	
		Proveedor AFR	2019DM-0019257	
	Cepillo interproximal viajero.	2017DM-0001210-R1		
	Estuche	NO APLICA		

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-113
		Versión: 6
		Página 2 de 11

<b>INGREDIENTES</b>	Crema Dental Adultos Sonrident	Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate, Cellulose Gum, Aroma, Sodium Saccharin, Menthol, Sodium Fluoride, Calcium Carbonate, Sodium Benzoate. Puede contener: CI77891, Sodium Hydroxide, Phosphoric Acid.
	Crema Dental Anticaries Proquident	Calcium Carbonate, Sodium Fluoride, Sodium Lauryl Sulfate, Hydrated Silica, Sodium Benzoate, Glycerin, Sorbitol, CI77891, Menthol, Sodium Saccharin, Aroma, Cellulose Gum, Aqua. Puede contener: Hydrated Silica (and) CI74160, CI42090, CI 77019, CI 15040, CI 14720, CI 77891, CI74260, Sodium Hydroxide, Phosphoric Acid.
	Crema Dental Dientes Sensibles Blanqueadora Proquident	Sorbitol, Water, Glycerin, Hydrated Silica, Potassium Citrate (5.6%), Pentasodium Triphosphate, Sodium Laureth Sulfate PVP, PEG 12, Aroma, Cellulose Gum, CI 77891, Sodium Fluoride (0.3% 1357 ppm), Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Decil Glucoside, Menthol.
	Crema Dental Naturals Proquident	Sorbitol, Hydrated Silica, Water, Xylitol, Glycerin, Hydroxyapatite, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Carrageenan, Menthol, Titanium Dioxide, Calendula Officinalis Flower Extract, Sodium Benzoate, Sodium Saccharin.
	Cera para ortodoncia	Cera microcristalina, Parafina, Aceite mineral, Colorante, Aloe Vera, Caléndula, Vitamina E, Mentol
	Cepillo interproximal viajero	Poliestireno y alambre inoxidable recubierto con poliuretano.
	Cepillo Dental	Polipropileno y Nylon Dupont Tynex.
<b>TIEMPO DE VIDA UTIL</b>	Seda Dental	Nylon y Cera natural
	Crema Dental	3 años
	Cepillo Dental	
	Seda Dental	
<b>FABRICANTE</b>	Cera para ortodoncia	2 años
	Crema Dental	Proquident S.A.
	Cepillo Dental	Cepimax S.A.S
	Seda Dental	Proquident S.A.

<b>CREMA DENTAL ADULTOS SONRIDENT</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Masa viscosa homogénea, libre de partículas extrañas

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-113
		Versión: 6
		Página 3 de 11

COLOR	Blanco
OLOR	Menta, según estándar
SABOR	Menta, según estándar
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
pH	6,50 - 8,50
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0000 - 1,4000
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Fluoruro de Sodio 0,321% (1452 PPM de Flúor)
VISCOSIDAD	80.000 cP – 200.000 cP
TORQUE	20,0 % – 80,0 %
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (CREMA DENTAL ADULTOS SONRIDENT)</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protección anticaries</li> <li>- Dientes fuertes, sanos y blancos</li> <li>- Aliento fresco</li> <li>- Combate la placa bacteriana durante el cepillado</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	Cepillar los dientes tres veces al día, después de cada comida o según recomendación del odontólogo, con <i>Crema Dental Sonrident</i> .
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: exposición directa a la luz solar, temperatura mayor de 30°C, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-113
		Versión: 6
		Página 4 de 11

<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	No ingerir. Recomendada para mayores de 6 años. En menores de 2 años se debe emplear lo equivalente a “medio grano de arroz crudo”; de 2 a 4 años lo equivalente a “un grano de arroz crudo”; y en mayores de 4 años lo equivalente a “una lenteja cruda”. Si se recibe flúor de otras fuentes, se debe consultar al odontólogo.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Tubo colapsible ABL con tapa en PP.

<b>CREMA DENTAL ANTICARIES PROQUIDENT</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Pasta viscosa homogénea, con partículas verdes
COLOR	Blanco con micropartículas verdes
OLOR	Menta, según estándar
SABOR	Menta, según estándar
<b>CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
pH	6,00 - 9,00
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,0000 - 1,4000
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Fluoruro de Sodio 0,321 % (1452 PPM de Flúor)
VISCOSIDAD	80000 cPs – 200000 cPs
TORQUE	20 % – 80 %
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (CREMA DENTAL ANTICARIES PROQUIDENT)</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aliento fresco.</li> <li>- Encías saludables.</li> <li>- Fortalece el esmalte dental.</li> <li>- Disminuye la formación de sarro.</li> <li>- Crema Dental Anticaries.</li> <li>- Micropartículas para limpieza profunda.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	Cepillar los dientes tres veces al día, después de cada comida o según recomendación del odontólogo, con <i>Crema Dental Proquident</i> .
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-113
		Versión: 6
		Página 5 de 11

	<p>cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: exposición directa a la luz solar, temperatura mayor de 30°C, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	No ingerir. Para niños de 6 años y menores se recomienda usar una cantidad de una gota, supervisados por un adulto para minimizar que sea ingerida. Si se recibe Flúor de otras fuentes y/o se presenta alguna reacción suspender su uso y se debe consultar al odontólogo.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Tubo colapsible ABL con tapa en PP.

<b>CREMA DENTAL CON FLÚOR SENSITIVE PROQUIDENT</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Pasta viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Blanco
OLOR	Menta, según estándar
SABOR	Menta, según estándar
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
pH	6,50 – 8,50
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,1000 - 1,4000
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Fluoruro de Sodio 0,3 % (1357 ppm de Flúor)
VISCOSIDAD	80.000 cP – 190.000 Cp
TORQUE	20,0 % – 80,0 %
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-113
		Versión: 6
		Página 6 de 11

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (CREMA DENTAL CON FLÚOR SENSITIVE PROQUIDENT)</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<p>Crema dental de uso diario, que ayuda a controlar y prevenir efectivamente la sensibilidad dental y la caries, gracias a su contenido de flúor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Citrato de potasio.</li> <li>- Ayuda a mantener el color natural de los dientes.</li> <li>- Agradable sabor menta.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>Cepillar los dientes tres veces al día, después de cada comida o según recomendación del odontólogo, con <i>Crema Dental con flúor Sensitive Proquident</i>.</p> <p>No ingerir. Enjuagar completamente después del cepillado. Use <i>Seda Dental Proquident</i> diariamente. Para mayores resultados utilice el <i>Enjuague bucal con flúor Sensitive Proquident</i>. Visite al odontólogo 2 veces al año.</p>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	<p>No ingerir. Se recomienda su uso en mayores de 6 años. Si recibe Flúor de otras fuentes y/o el problema de sensibilidad persiste, visite a su odontólogo.</p> <p>Para niños de 6 años y menores, se recomienda usar una cantidad del tamaño de una lenteja, supervisado por un adulto para minimizar que sea ingerida.</p>
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Tubo colapsible ABL con tapa en PP.

<b>CREMA DENTAL NATURALS PROQUIDENT</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Pasta viscosa homogénea.
COLOR	Blanco
OLOR	Menta, según estándar

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-113
		Versión: 6
		Página 7 de 11

SABOR	Menta, según estándar
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
pH	6,50 – 8,50
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,1100 – 1,4000
VISCOSIDAD	80.000 cP – 180.000 cP
TORQUE	20,0 % – 80,0 %
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (CREMA DENTAL NATURALS PROQUIDENT)	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Crema dental libre de flúor</li> <li>Ayuda a:</li> <li>- Mantener encías y boca sana</li> <li>- Mantener el color natural de tus dientes</li> <li>- Prevenir la formación de caries</li> <li>- Con Xilitol y Extracto de Caléndula</li> <li>Sabor a menta.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	Cepillar los dientes tres veces al día después de cada comida o según recomendación del odontólogo, con <i>Crema dental Proquident Naturals</i> . Completar la higiene bucal con <i>Enjuague Bucal Naturals</i> y <i>Seda dental Proquident</i> , diariamente.
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Procure mantener los cosméticos en sitios aireados, frescos y secos. Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto cosmético.</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-113
		Versión: 6
		Página 8 de 11

<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	<p>No ingerir. Para niños menores de 6 años se recomienda utilizar bajo la supervisión de un adulto.</p> <p>El uso continuo de la Crema dental Naturals Proquident con Xilitol e Hidroxiapatita, ayuda a reducir la hipersensibilidad y la desmineralización. Gracias a su extracto de caléndula, previene el sangrado de las encías. Además, combate la placa bacteriana, el mal aliento y fortalece el esmalte dental</p>
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Tubo colapsible ABL con tapa en PP.

<b>CEPILLO DENTAL</b>		
<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO		Cepillo de polipropileno con cerdas blancas de Nylon Dupont Tynex, mango traslúcido marcado con el logo de Proquident en colores surtidos. Cerdas internas más cortas que las externas.
COLOR		Colores surtidos
<b>CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
DIMENSIONES	Cantidad de orificios	38 Agujeros
	Filamentos por agujero	10 - 19 Filamentos
	Altura de las cerdas internas	8,00 mm ± 0,50 mm
	Altura de las cerdas externas	11,00 mm ± 0,50 mm
	Largo total	175 mm ± 1 mm
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES</b>
NO APLICA		

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (CEPILLO DENTAL)</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental.</li> <li>- Cerdas en corte V para eliminar la placa alrededor de los Brackets.</li> <li>- Palillo de goma para una mejor limpieza.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>Cepílese los dientes, mínimo tres veces al día.</p> <p>El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su boca y permitirle llegar a todas las zonas con facilidad.</p> <p>Limpie las superficies externas e internas de los dientes superiores y luego las de los dientes inferiores, limpie las superficies de</p>



<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-113
		Versión: 6
		Página 9 de 11

	masticación. Para tener un aliento más fresco, no olvide cepillarse también la lengua y utilizar pasta dentífrica.
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	<p>Recuerde cambiar su cepillo de dientes cada dos meses, o antes si las cerdas se desgastan, adicional se recomienda cambiar el cepillo de dientes después de estar enfermo.</p> <p>Si nota alguna reacción extraña en su cavidad oral, suspender de inmediato su uso, y consultar con su odontólogo de confianza.</p> <p>Para tener una mejor higiene bucal use crema dental, cepillo y enjuague bucal Proquident diariamente. Consulte a su odontólogo regularmente.</p>
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	NO APLICA

<b>SEDA DENTAL</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Filamento entrelazado, liso al tacto
COLOR	Blanco a levemente amarillo, según estándar
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
CONTENIDO DE PRINCIPIO ACTIVO	Cera de natural
<b>CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
PORCENTAJE DE CERA	20 % - 27 %
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
NO APLICA	

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (SEDA DENTAL)</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seda Dental con Cera natural</li> <li>- Remueve la placa bacteriana y los residuos que la producen</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corte aproximadamente 40 cm de <i>Seda Dental</i> y enrolle los extremos alrededor del dedo medio de ambas manos.</li> <li>2. Haga pasar la seda entre diente y diente, usando los dedos pulgar e índice.</li> <li>3. Presione la seda contra cada uno de los dientes y desplácela de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro.</li> </ol> <p>Repita la operación anterior con un nuevo tramo de <i>Seda Dental</i>.</p>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Conserve en un lugar fresco y seco. Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-113
		Versión: 6
		Página 10 de 11

	Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 °C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	Úsela antes o después de cada cepillado. Consulta a tu odontólogo regularmente.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Estuche Seda dental en PP.

<b>CERA PARA ORTODONCIA</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Barra de cera lisa y suave al tacto
COLOR	Blanco a amarillo pálido
OLOR	Característico a cera
SABOR	Insaboro
<b>CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ALTURA DE LA BARRA	5 cm
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Mezcla de ceras, Caléndula, vitamina E, Aloe vera
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
	NO APLICA

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenera la superficie maltratada por el tratamiento de ortodoncia.</li> <li>- Caléndula + Vitamina E + Aloe Vera</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>La <i>Cera para ortodoncia Proquident</i>, evita laceraciones y heridas ocasionados por los aparatos de ortodoncia en los tejidos blandos de la boca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Retire una barra de ortodoncia Proquident.</li> <li>-Corte pequeños trozos y adherirlos a cada una de las piezas (Brackets) donde se siente la molestia.</li> </ul>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Conserve en un lugar fresco y seco. Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-113
		Versión: 6
		Página 11 de 11

<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	Mantenga fuera del alcance de los niños. Uso externo. El uso en niños debe estar supervisado por un adulto.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Cartulina + PET transparente.

<b>CEPILLO INTERPROXIMAL</b>		
<b>ASPECTO</b>		Cepillo interproximal con mango azul de polipropileno, tapa protectora de polipropileno transparente con lote y fecha de vencimiento impresos, cerdas blancas colocadas en forma cónica homogéneas y alambre inoxidable recubierto con poliuretano
<b>MATERIAL PARTICULADO</b>		Ausencia
<b>TEXTURA DE LAS CERDAS</b>		Suave
<b>DIMENSIONES</b>	Calibre del alambre	0,31 mm
	Diámetro de la cabeza	3,00 mm $\pm$ 0,25 mm
	Largo de la cabeza	12,40 mm $\pm$ 0,40 mm
	Largo total del cepillo	15,50 mm $\pm$ 0,50 mm
	Largo total sin tapa	65,30 mm $\pm$ 0,30 mm
	Diámetro de la base del mango	6,70 mm $\pm$ 0,02 mm
	Largo de la tapa	52,30 mm $\pm$ 0,40 mm
	Largo total con tapa	74,50 mm $\pm$ 0,50 mm
<b>USOS</b>		Cepillo interproximal individual viajero diseñado para una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental, especialmente en personas sometidas a tratamientos de ortodoncia