

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-17
		Versión:
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	OXIDO DE ZINC PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 10 g	7702314210351	37702314210352	x 25 unidades
	x 175 g	7702314210313	27702314210317	x 16 unidades
	x 460 g	7702314210344	17702314210341	x 4 unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2023DM-0026661			
INGREDIENTES	Óxido de Zinc USP			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	4 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	2817.00.10.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Polvo muy fino amorfo de color blanco o amarillo claro, inodoro.
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
SOLUBILIDAD	Insoluble en agua y en alcohol, soluble en diluentes ácidos.
IDENTIFICACIÓN	Cuando se calienta fuertemente, presenta color amarillo.
PERDIDA POR IGNICIÓN	< 1 %
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Óxido de Zinc 100 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> • Grado USP. • Uso odontológico.
MODO DE EMPLEO	Sobre una loseta se mezclan una parte de Óxido de Zinc con una parte de Eugenol Proquident, espatulando vigorosamente hasta obtener una pasta homogénea y de fácil manejo.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: <i>GC-FT-17</i>
		Versión:
		Página 2 de 2

	no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Se utiliza para formar el eugenolato cuando se mezcla con el Eugenol USP Proquident.</p> <p>Consérvese bien tapado y en un lugar fresco y seco, una vez se preparar el Eugenolato no se debe almacenar.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Evitar el contacto directo con las mucosas, mantener bien tapado en un lugar fresco y menor de 30°C, protegido de la luz directa. No se debe ingerir.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase PEAD por 20, 175 y 460 g

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com