

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-17
		Versión: 6
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	ÓXIDO DE ZINC			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	10 g	7702314210351	37702314210352	x 25 Unidades
	175 g	7702314210313	27702314210317	x 16 Unidad
	460 g	7702314210344	17702314210341	x 4 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2023DM-0026661			
INGREDIENTES	Óxido de Zinc USP			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	4 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Polvo muy fino amorfo
COLOR	Blanco o amarillo claro, según estándar
OLOR	Inodoro
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
SOLUBILIDAD	Insoluble en agua y en alcohol, soluble en diluentes ácidos
IDENTIFICACIÓN	Cuando se calienta fuertemente, presenta color amarillo
PÉRDIDA POR IGNICIÓN	≤ 1 %
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Óxido de Zinc 100%
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	- Óxido de Zinc USP – Alta Pureza. - Uso odontológico.
MODO DE EMPLEO	Se utiliza en la fabricación de un cemento temporal a base de Eugenolato cuando se mezcla con el <i>Eugenol Proquident</i> . Colocar sobre una loseta el Óxido de Zinc y humedecerlo lentamente con Eugenol, mezclando vigorosamente hasta obtener una pasta moldeable y compacta.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Consérvese bien tapado en un lugar fresco, seco y lejos del alcance de los niños. Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener en sitios aireados, frescos y secos.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-17
		Versión: 6
		Página 2 de 2

	Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto. Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Utilizar guantes, gafas de seguridad, protección respiratoria y prendas adecuadas para su manipulación. Realiza la mezcla Óxido de Zinc/Eugenol según criterios propios del consultorio, la cual debe USARSE DE MANERA INMEDIATA, NO DEBE ALMACENARSE.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase en PEAD.