

	<b>FICHA TÉCNICA</b>			Código: GC-FT-486
	<b>PRODUCTO TERMINADO</b>			Versión: 6
				Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	PASTA PARA PROFILAXIS PROQUIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	x 60 g	7702314250623	37702314250624	x 42 Unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	2025DM-0031153			
<b>INGREDIENTES</b>	Piedra pómez, Glicerina, Agua, Sorbitol, Citrato de Potasio, Fluoruro de Sodio, Silica, Color, Sabor menta, Carboximetil celulosa, Benzoato de Sodio y Tensoactivo no iónico.			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3 años			
<b>FABRICANTE</b>	Proquident S.A.			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Masa viscosa homogénea, libre de grumos
COLOR	Azul profundo, según estándar
OLOR	Característico a menta
SABOR	Menta, según estándar
<b>CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
pH	9,00 – 10,50
GRAVEDAD ESPECÍFICA	Informativa
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Fluoruro de Sodio 2,719 % (equivalente a 1,23% de flúor)
	Citrato de potasio 3,0 %
VISCOSIDAD	80.000 cP - 180.000 cP
TORQUE	20,0 % – 80,0 %
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
MESÓFILOS	< 100 UFC/g
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/g
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para la remoción de manchas externas.</li> <li>- Con Citrato de Potasio y Flúor.</li> <li>- Excelentes coadyuvantes para el manejo de la sensibilidad dental y la remineralización.</li> <li>- Sabor a Menta.</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	Adicionar la pasta para profilaxis en un dappen u otro recipiente adecuado. Iniciar la aplicación utilizando velocidades bajas o moderadas, usar copa de caucho o cepillo para profilaxis. Depositar

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident</b> <sup>®</sup>	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-486
		Versión: 6
		Página 2 de 2

	el producto para remoción de manchas en cada superficie dental e iniciar la limpieza mecánica profesional.
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 °C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener bien tapado y protegido de la luz directa. Uso estrictamente profesional. No se debe ingerir.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Tubo colapsible en PBL con tapa en PP.

Copia no controlada