

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO			Código: GC-FT-486
				Versión: 5
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	PASTA PARA PROFILAXIS PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 60 g	7702314250623	37702314250624	x 42 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2015DM-0013830			
INGREDIENTES	Citrato de Potasio, Fluoruro de Sodio, Piedra Pómez, Glicerina, Carboximetilcelulosa, Sorbitol, Sílica, Sabor, Benzoato de Sodio, Tensoactivo no iónico, Agua, Color.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.10.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Pasta viscosa homogénea, libre de grumos
COLOR	Azul profundo
OLOR	Característico a Menta
SABOR	Menta, según estándar
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	9,00 – 10,00
GRAVEDAD ESPECÍFICA	Informativa
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Fluoruro de Sodio 2,719 % (equivalente a 1,23% de flúor)
	Citrato de potasio 3,0 %
VISCOSIDAD	80.000 cP - 180.000 cP
TORQUE	20,0 % – 80,0 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/g
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/g
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Para la remoción de manchas externas. - Con Citrato de Potasio y Flúor. - Excelentes coadyuvantes para el manejo de la sensibilidad dental y la remineralización. - Sabor a Menta.
MODO DE EMPLEO	Adicionar la pasta para profilaxis en un dappen u otro recipiente adecuado. Iniciar la aplicación utilizando velocidades bajas o

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident®	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-486
		Versión: 5
		Página 2 de 2

	moderadas, usar copa de caucho o cepillo para profilaxis. Depositar el producto para remoción de manchas en cada superficie dental e iniciar la limpieza mecánica profesional.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 °C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener bien tapado y protegido de la luz directa. Uso estrictamente profesional. Evitar el contacto directo con las mucosas. No se debe ingerir.
MATERIAL DE EMPAQUE	Tubo colapsible por 60 g.