

Proquident®

Protocolo de desinfección

Es ideal para remover sangre, proteínas, desecho celular, tejidos secreciones respiratorias, mucosa, saliva, heces y cualquier tipo de material orgánico.

Antes de los procesos de desinfección y/o esterilización.

No es corrosivo, no contamina el medio ambiente. No reutilizar.

Uso de áreas y equipos: Aplicar la solución y dejar actuar de 5 a 10 minutos, luego de pasado el tiempo, enjuagar con **abundante agua**

Fórmula **enzimática avanzada** para la limpieza de instrumentos, áreas y equipos.

Lubricante natural.

Biodegradable

Colocar el **instrumental** en un recipiente con líquido.

1 litro de agua / 10 mL del producto.

Dejar actuar de **5 a 10 minutos.**

Enjuagar.

Empacar y esterilizar.

