

Proquident	FICHA TÉCNICA	Código: GC-FT-527
	PRODUCTO TERMINADO	Versión: 3
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESINFECTANTE MULTIENZIMÁTICO EN POLVO PROQUIZYME PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	1 Sachet x 20g c/u	7702314240556	37702314240557	x 72 Unidades
	12 Sachets x 20g c/u	7702314240549	17702314240546	x 6 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2016DM-0014487			
INGREDIENTES	Amonio Cuaternario de Quinta generación, Blend de Enzimas (Proteasa, Amilasa y Celulasa), Tensoactivo No Iónico, Secuestrantes, Excipientes C.S.P.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3808.94.19.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Polvo granular
COLOR	Blanco grisáceo
OLOR	Característico
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	9,00 – 11,00
HUMEDAD	Max. 4 %
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Blend de Enzimas (Lipasa, Proteasa, Amilasa, Carbohidrasa) 7,5 %. Cloruro de Alquildimetilbencilamonio y Cloruro de Alquildimetiletilbencilamonio 13 % (5,2 % de materia activa).
SOLUBILIDAD	Soluble en agua.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Desinfectante Multienzimático en polvo</i> para uso en instrumental quirúrgico, médico y odontológico. - Fórmula avanzada con agentes detergentes y desinfectantes que limpian el instrumental, sin enjuague previo, sin cepillar y sin usar ningún otro producto. - Rápida acción. - Activo contra bacterias, hongos y virus. - No tóxico. - No corrosivo.
MODO DE EMPLEO	Colocar en un recipiente 4L de agua (preferiblemente tibia) y adicionar la cantidad total de un sobre de 20 g. Revolver durante 1 minuto y sumergir el instrumental a limpiar y descontaminar. Dejar

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-527
		Versión: 3
		Página 2 de 2

	actuar por 15 minutos, luego de la inmersión. Enjuague con abundante agua y continúe con el proceso de esterilización.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar bien tapado en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa. En climas cálidos, almacenar bajo aire acondicionado a 25°C.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Manténgase tapado, alejado de fuentes de ignición. Almacenar a una temperatura menor de 30°C, protegido de la luz directa y del alcance de los niños y mascotas.
MATERIAL DE EMPAQUE	Caja plegadiza y sobres de sachet laminados.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com