

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA	Código: GC-FT-527
	PRODUCTO TERMINADO	Versión: 10
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESINFECTANTE MULTIENZIMÁTICO EN POLVO PROQUIZYME			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	Sachet x 20g	7702314240556	37702314240557	72
	12 Sachets x 20g	7702314240549	17702314240546	6
NOTIFICACIÓN SANITARIA	INVIMA 2026DM-0014487 – R1			
INGREDIENTES	Amonio cuaternario de quinta generación, Blend de enzimas (Proteasa, Amilasa y Celulasa), Tensoactivo no iónico, Secuestrantes, excipientes c.s.p			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.S.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Polvo granular
COLOR	Blanco grisáceo
OLOR	Característico
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
pH	9,00 – 11,00
HUMEDAD	Max. 4 %
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Blend de Enzimas (Proteasa, Amilasa y Celulasa) 2,5 %.
	Cloruro de Alquildimetilbencilamonio y Cloruro de Alquildimetiletilbencilamonio 13 % (5,2 % de materia activa).
SOLUBILIDAD	Soluble en agua.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Uso en instrumental quirúrgico, médico y odontológico. - Fórmula avanzada con agentes detergentes y desinfectantes que limpian y desinfectan el instrumental sin necesidad de enjuague previo, sin cepillado y sin utilizar ningún otro tipo de producto. - No tóxico - No corrosivo - Rápida acción. - Activo contra bacterias, hongos y virus.
MODO DE EMPLEO	<p>Cada sobre de 20g debe mezclarse con 4L de agua, preferiblemente tibia (30°C-40°C). Revuelva durante 1 minuto hasta que se disuelva completamente. A continuación, sumerja el instrumental en el volumen necesario para cubrirlo por completo y proceder a su limpieza y desinfección. Deje actuar durante 15 minutos después de la inmersión. Luego, enjuague con abundante</p>

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-527
		Versión: 10
		Página 2 de 2

	agua, seque y continúe con el proceso de esterilización. La solución preparada que no haya sido utilizada debe guardarse en un recipiente tapado, alejado de la luz solar. Utilice únicamente la cantidad necesaria en cada aplicación, NO ES REUTILIZABLE (DE UN SOLO USO) . El producto activado tiene una vida útil de 30 días desde su preparación.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a una temperatura menor a 30°C.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Manténgase tapado, alejado de fuentes de ignición, protegido de la luz directa y del alcance de los niños y mascotas.
MATERIAL DE EMPAQUE	Caja plegadiza en cartulina maule laminado Mate y bolsa sachet individual en PET + Nylon / PAPE.

Copia no controlada