

NOMBRE DEL PRODUCTO	SEDA DENTAL 400 M BLÍSTER PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	400 m seda	7702314114000	17702314114007	x 8 Unidades
	400 m seda + 12 m seda	7702314114024	17702314114021	X 8 Unidades
	400 m seda + 50 m seda	7702314117506	17702314117503	X 8 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2017DM-0016095			
INGREDIENTES	Nylon, Cera Natural, Aroma			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.S.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Filamento entretejido, liso al tacto
COLOR	Blanco a levemente amarilloso, según estándar
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
CONTENIDO DE PRINCIPIO ACTIVO	Cera de Natural
PORCENTAJE DE CERA	20 % – 27 %
METRAJE	400 m – 410 m
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Seda dental con cera natural. - Remueve la placa bacteriana y los residuos que la producen.
MODO DE EMPLEO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corte aproximadamente 40 cm de <i>Seda Dental</i> y enrolle los extremos alrededor del dedo medio de ambas manos. 2. Haga pasar la seda entre diente y diente, usando los dedos pulgar e índice. 3. Presione la seda contra cada uno de los dientes y desplácela de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. 4. Repita la operación anterior con un nuevo tramo de <i>Seda Dental</i>.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Conserve en un lugar fresco y seco. Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o</p>

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-20
		Versión: 4
		Página 2 de 2

	humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Úsela antes o después de cada cepillado. Consulta a tu odontólogo regularmente.
MATERIAL DE EMPAQUE	Estuche seda dental en PP, empacado en cartón con burbuja plástica en PET.

Copia no controlada