

<b>Proquident</b> <sup>®</sup>	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Código: GC-FT-772
	<b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Versión: 6
		Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	SEDA DENTAL 50 M BLÍSTER PROQUIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	50 metros X 1 Und	7702314117452	37702314117453	X 36 unidades
	50 metros X 2 Und	7702314117490	17702314117497	x 12 unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	2017DM-0016095			
<b>INGREDIENTES</b>	Nylon, Cera Natural, Aroma.			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	3 años			
<b>FABRICANTE</b>	Proquident S.A.S.			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Filamento entretejido, liso al tacto
COLOR	Blanco a levemente amarilloso, según estándar
OLOR	Menta, según estándar
SABOR	Menta, según estándar
<b>CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Cera natural
PORCENTAJE DE CERA	20% - 27%
METRAJE	50 m – 55 m
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
	NO APLICA

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con cera natural</li> <li>- Remueve la placa bacteriana y los residuos que la producen</li> <li>- Sabor a menta</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corte 40 cm aproximadamente de <i>Seda Dental</i> y enrolle los extremos alrededor del dedo medio de ambas manos.</li> <li>2. Haga pasar la seda entre diente y diente, usando los dedos pulgar e índice.</li> <li>3. Presione la seda contra cada uno de los dientes y desplácela de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro.</li> <li>4. Repita la operación anterior con un nuevo tramo de <i>Seda Dental</i>.</li> </ol>
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Conserve en un lugar seco y fresco. Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident</b> <sup>®</sup>	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-772
		Versión: 6
		Página 2 de 2

	<p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	Úsela antes o después de cada cepillado. Consulta a tu odontólogo regularmente.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Estuche seda dental en PP, empacado en cartón con burbuja plástica PET.

Copia no controlada