

	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO		Código: GC-FT-142
			Versión: 7
			Página 1 de 1

NOMBRE DEL PRODUCTO	REPUESTO SEDA DENTAL 400 M PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	400m	7702314114017	27702314114011	16 x Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	INVIMA 2017DM-0016095			
INGREDIENTES	Nylon, Cera Natural, Aroma.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Filamento entretejido, liso al tacto
COLOR	Blanco a levemente amarilloso
OLOR	Característico Menta
SABOR	Característico Menta
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
PORCENTAJE DE PARAFINA Y MENTA	20% - 27%
METRAJE	400 m – 410 m
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL o g
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL o g
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	- Con cera. - Sabor a menta. - Remueve la placa bacteriana y los residuos que la producen.
MODO DE EMPLEO	Cortar aproximadamente 40 cm de cinta, enrollar en el dedo medio o del corazón la mayor cantidad de seda e ir enrollando la seda utilizada en el dedo medio de la otra mano. Haga pasar la seda entre diente y diente usando los dedos pulgar e índice. Repita la operación anterior con nuevo tramo de cinta dental de teflón.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Mantener fuera del alcance de los niños. El uso en niños debe ser supervisado por un adulto.
MATERIAL DE EMPAQUE	Estuche plástico en PP, burbuja plástica PET y respaldo de cartón.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com