

Proquident	FICHA TÉCNICA			Código: GC-FT-145
	PRODUCTO TERMINADO			Versión: 3
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	SEDA DENTAL CON CERA Y MENTA 30 M BLÍSTER X 1 UND SONRIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	30 Metros	7702314117261	37702314117262	x 36 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	2017DM-0016095			
INGREDIENTES	Nylon, Cera Alba, Aroma, Menthol, Sodium Saccharin.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3306.20.00.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Filamento entretejido, liso al tacto
COLOR	Blanco a levemente amarillizo, según estándar
SABOR	Menta, según estándar
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
CONTENIDO DE PRINCIPIO ACTIVO	Cera de abejas
PORCENTAJE DE CERA	22 % – 27 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Seda dental <i>Sonrident</i> con cera sabor a menta. - Remueve la placa bacteriana y los residuos de la producen.
MODO DE EMPLEO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corte 40 cm. aproximadamente de <i>Seda Dental</i> y enrolle los extremos alrededor del dedo medio de ambas manos. 2. Haga pasar la seda entre diente y diente, usando los dedos pulgar e índice. 3. Presione la seda contra cada uno de los dientes y desplácela de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. 4. Repita la operación anterior con un nuevo tramo de <i>Seda Dental</i>.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Conserve en un lugar fresco y seco. Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-145
		Versión: 3
		Página 2 de 2

PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Úsela antes o después de cada cepillado. Consulta a tu odontólogo regularmente.
MATERIAL DE EMPAQUE	Estuche seda dental en PP, empacado en cartón con burbuja plástica en PET.

Copia no controlada

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com