

<b>Proquident</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b>			Código: GC-FT-21
	<b>PRODUCTO TERMINADO</b>			Versión: 9
				Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	XILODENT PROQUIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	20 mL	7702314230724	37702314230725	x 32 Unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	<b>COLOMBIA:</b> Reg. INVIMA N° 2020DM-0021216			
	<b>ECUADOR:</b> Reg. Sanitario 20033-DME-1225			
	<b>PERÚ:</b> RUC 20271470381 R.S. N° DM20969E			
<b>INGREDIENTES</b>	Xilol y Alcohol			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	2 años			
<b>FABRICANTE</b>	Proquident S.A.S.			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Líquido traslúcido, homogéneo, libre de partículas extrañas.
COLOR	Incoloro.
OLOR	Característico aromático, según estándar.
<b>CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
SOLUBILIDAD	Insoluble en agua.
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,8335 – 0,8835
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
NO APLICA	

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disolvente</li> <li>- Uso odontológico</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	Depositar la cantidad necesaria en un vaso rapen de vidrio y sumergir la lima, para rápidamente ponerla en la entrada del conducto a desobturar hasta asegurar la completa disolución de la gutapercha.
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Almacenar bien tapado, en su envase original, en un lugar fresco menor a 30 °C, evitando la exposición directa a la luz solar y fuentes de humedad.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident</b> <sup>®</sup>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-21
		Versión: 9
		Página 2 de 2

<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	Mantener alejado del alcance de los niños. Evitar el contacto con ojos, piel y mucosas. Utilizar guantes, gafas de seguridad y prendas adecuadas para su manipulación.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Envase de vidrio ámbar con tapa en PP.

Copia no controlada

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)