

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-21
		Versión: 8
		Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	XILODENT PROQUIDENT			
<b>PRESENTACIÓN COMERCIAL</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>EAN 13</b>	<b>EAN 14</b>	<b>UND EMPAQUE</b>
	20 mL	7702314230724	37702314230725	x 32 Unidades
	20 mL Exportación	7702314230908	37702314230909	x 32 Unidades
<b>NOTIFICACIÓN SANITARIA</b>	<b>COLOMBIA:</b> Reg. INVIMA N° 2020DM-0021216			
	<b>GUATEMALA:</b> Reg. Sanitario OD-2873			
	<b>PERÚ:</b> RUC 20271470381 R.S. N° DM20969E			
<b>INGREDIENTES</b>	Xilol y Alcohol			
<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>	2 años			
<b>FABRICANTE</b>	Proquident S.A.			

<b>CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
ASPECTO	Líquido traslúcido, homogéneo, libre de partículas extrañas.
COLOR	Incoloro.
OLOR	Característico aromático, según estándar.
<b>CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
SOLUBILIDAD	Insoluble en agua.
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,8335 – 0,8335
<b>CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>	<b>ESPECIFICACIONES</b>
NO APLICA	

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	
<b>PROCLAMAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disolvente</li> <li>- Uso odontológico</li> </ul>
<b>MODO DE EMPLEO</b>	Depositar la cantidad necesaria en un vaso rapen de vidrio y sumergir la lima, para rápidamente ponerla en la entrada del conducto a desobturar hasta asegurar la completa disolución de la gutapercha.
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Almacenar bien tapado, en su envase original, en un lugar fresco menor a 30 °C, evitando la exposición directa a la luz solar y fuentes de humedad.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior</p>

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página [www.proquident.binaps.com](http://www.proquident.binaps.com)

<b>Proquident®</b>	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>	Código: GC-FT-21
		Versión: 8
		Página 2 de 2

	no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
<b>PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES</b>	Mantener alejado del alcance de los niños. Evitar el contacto con ojos, piel y mucosas. Utilizar guantes, gafas de seguridad y prendas adecuadas para su manipulación.
<b>MATERIAL DE EMPAQUE</b>	Envase de vidrio ámbar con tapa en PP.

Copia no controlada