

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA			Código: GC-FT-21
	PRODUCTO TERMINADO			Versión: 10
				Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	XILODENT PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	20 mL	7702314230724	37702314230725	x 32 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	COLOMBIA: Reg. INVIMA N° 2020DM-0021216			
	ECUADOR: Reg. Sanitario 20033-DME-1225			
	PERÚ: RUC 20271470381 R.S. N° DM20969E			
INGREDIENTES	Xilol y Alcohol			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.S.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido traslúcido, homogéneo, libre de partículas extrañas.
COLOR	Incoloro.
OLOR	Característico aromático, según estándar.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
SOLUBILIDAD	Insoluble en agua.
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,8335 – 0,8835
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Disolvente - Uso odontológico
MODO DE EMPLEO	Depositar la cantidad necesaria en un vaso rapen de vidrio y sumergir la lima, para rápidamente ponerla en la entrada del conducto a desobturar hasta asegurar la completa disolución de la gutapercha.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Almacenar bien tapado, en su envase original, en un lugar fresco menor a 30 °C, evitando la exposición directa a la luz solar y fuentes de humedad.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-21
		Versión: 10
		Página 2 de 2

PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Mantener alejado del alcance de los niños. Evitar el contacto con ojos, piel y mucosas. Utilizar guantes, gafas de seguridad y prendas adecuadas para su manipulación.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase de vidrio ámbar con tapa en PP.

Copia no controlada