

Catálogo productos de bioseguridad



Glutacides Plus+

Desinfectante de alto nivel. Alta desinfección en 20 minutos.

(Glutaraldehído al 2%) con agente inhibidor de la corrosión.

 45 días activado.

 Alta desinfección en **20** minutos.

 Con agente anticorrosivo.

 Desinfección instrumental.

 Biodegradable.

Aroma a limón

Registro sanitario:
INVIMA 2022DM-0025752

1000 mL.

REF:7702314240372

3.8 L.


REF:7702314240358



Modo de uso



1. Agregar la solución activadora al envase y agitar. Anotar en el espacio señalado en la etiqueta, la fecha de la activación y la fecha de expiración (le mezcla se mantiene activa durante 45 días).

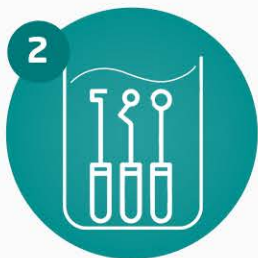

2. Lavar muy bien el instrumental a desinfectar o esterilizar y adicionar la cantidad requerida de Glutacides Proquident en la cubeta, de tal forma que lo cubra totalmente.



3. Dejar mínimo 20 minutos dentro de la solución activada si se va a desinfectar. Enjuagar luego con agua destilada. Para esterilizar, dejar mínimo 8 horas. Enjuagar luego con agua destilada o con agua que haya sido sometida a ebullición por 10 minutos.





Detergente Proquizyme Plus

Detergente multienzimático de última generación, contiene **Lipasa, Proteasa, Amilasa y Carbohidrasa**. Cuenta con un pH de 7 y agradable olor a naranja. Indicado para la limpieza de instrumentos quirúrgicos, en los campos médico, clínico, odontológico, bacteriológico; así como dispositivos de uso cosmético y afines.

Apropiado para uso en sistemas de limpieza ultrasónico, automático o manual.

Amigable con el medio ambiente.



1 litro de agua con 10mL de producto.
Dura un día después de activar el producto.

Modo de uso



1
Recuerda tus elementos de protección personal.




2
En un litro de agua, aplica **10 mL** de detergente. (Este litro dura un día).



3
Pon la medida necesaria en un contenedor cubriendo el instrumental.



4
Lava, enjuaga y seca el instrumental.

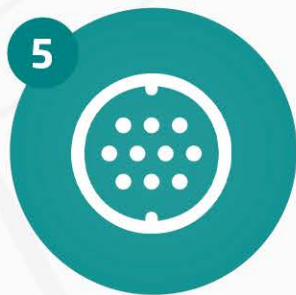

5
Bota por el alcantarillado el residuo del contenedor.



6
Lava el contenedor.



7
Recuerda rotular el producto con la fecha de activación del producto.

Presentación: **100 mL.** REF:7702314240563
500 mL. REF:7702314240433
3.8L. REF:7702314240464

Proquizyme desinfectante multienzimático en polvo

Fórmula avanzada con agentes detergentes y desinfectantes que limpian el instrumental, sin enjuague previo, sin cepillar y sin usar ningún otro producto.

- Rápida acción.
- Activo contra bacterias, hongos y virus.
- No tóxico, no corrosivo.

Presentación:

Caja por 12 sobres de 20 g.

REF:7702314240549

Registro sanitario:

INVIMA 2016DM-0014487



1 sobre en 4 litros de agua, que duran 30 días activados. Pasados 30 días desechar por el alcantarillado.



Proquizyme Plus desinfectante de superficie y dispositivos médicos.

Fórmula compuesta por amonios de quinta generación (Cloruro de Alquil Dimetil Bencil Amonio y Cloruro de Di-(Octil/Decil) Dimetil Amonio) combinado con un activo neutralizador de olores.

- Acción bactericida, fungicida y virucida.
- Eficacia comprobada contra Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis.
- Mientras desinfecta neutraliza olores.
- Rápido secado. No necesita enjuague.
- No tóxico.

Modo de uso



1
Aplica directamente en la superficie que deseas desinfectar.



2
Deja actuar por 1 minuto.



3
Retira con un paño desechable limpio y seco. No requiere enjuague previo ni lavado posterior.

Presentación:

240 mL.

REF:7702314240532

500 mL.

REF:7702314240518

3.8 L.

REF: 7702314240587

Registro sanitario:

INVIMA 2015DM-0013578

Usos: Desinfección de dispositivos médicos. Puede ser utilizado para la desinfección de unidades odontológicas, camillas ubicadas en hospitales e instituciones médicas u odontológicas



Gel antibacterial

Gel antibacterial ideal para el uso sobre manos.

- Sin triclosán.
- Con humectante.
- No tóxico.
- Úsalo sin jabón, sin agua y sin toalla.
- Alcohol al 65%.

Modo de uso



1 Aplica el producto sobre las manos.



2 Frótalo sobre toda la superficie de la palma y dedos.



3 Deja secar por cerca de **20 segundos**.

Presentación:
1000 mL.

REF: 7702314700388

Agua desionizada

Usada para autoclaves y lavadoras de instrumental en procesos de esterilización instrumental, quirúrgico o de laboratorio, por medio de calor húmedo.

- Estabilizada.
- No apta para consumo humano.

Presentación:
3.8 L.

REF:7702314240662



Alcohol 65%

Permite desinfectar superficies como pisos, mesas, mesones, dispositivos electrónicos móviles y fijos, prendas de vestir, calzado, bolsos o maletas y materiales similares

Presentación:

20 mL.

REF: 7702314240686

250 mL.

REF: 7702314240716

Anexo, unidades por empaque

Página	Referencia	Descripción Referencia	Unidad de empaque
Pág.1	7702314240358	GLUTACIDES LIMON 3800ML PROQUIDENT	6
Pág.1	7702314240372	GLUTACIDES LIMON 1000ML PROQUIDENT	6
Pág.2	7702314240563	DET. MULTIENZIMATICO 100ML PROQUIZYME	14
Pág.2	7702314240433	DET. MULTIENZIMATICO 500ML PROQUIZYME	10
Pág.2	7702314240464	DET. MULTIENZIMATICO 3800ML PROQUIZYME	6
Pág.3	7702314240549	D. MULTIENZIMATICO POLVO 12UN PROQUIZYME	4
Pág.3	7702314240532	DESINF. D.MEDICOS 240ML PROQUIZYME	16
Pág.3	7702314240518	DESINF. D.MEDICOS 500ML PROQUIZYME	19
Pág.3	7702314240587	DESINF. D.MEDICOS 3800ML PROQUIZYME	6
Pág.4	7702314700388	GEL ANTIBACTERIAL 1000ML PROQUIDENT	6
Pág.4	7702314240662	AGUA DESIONIZADA 3800ML PROQUIDENT	4
Pág.4	7702314240686	ALCOHOL 65% VIAJERO PROQUIDENT	30
Pág.4	7702314240716	ALCOHOL 65% 250ML PROQUIDENT	28

Sobre nosotros

Desde antes de los años 70, los productos odontológicos en Colombia eran importados en su mayoría. El campo de la salud bucal crecía con rapidez y la disponibilidad de los productos odontológicos, dependía de las importaciones. Era necesario entonces en el mercado colombiano, una compañía que elaborara para los profesionales de la salud bucal una línea de productos de alta calidad y buen precio.

Fue así como en 1975, nació en Medellín Proquident S.A., una compañía fundada por odontólogos, que conocían bien las necesidades de la salud bucal en el país. Hoy, Proquident S.A. hace parte del mercado colombiano, posee certificación de la norma **ISO 9001:2015** y la **ISO 22716:2007** e implementa las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), fortaleciendo de esta manera sus productos y formando un verdadero equipo de trabajo, con la suficiente motivación para innovar y entregar productos con óptima calidad y un excelente servicio al cliente. Así mismo, Proquident S.A., se proyecta e incursiona en los mercados internacionales, respaldado por su experiencia y calidad en cada uno de sus productos.

Actualmente nos sumamos a la protección ambiental, apropiando actividades en pro de la conservación de los ecosistemas como la reducción de plástico en nuestros productos y la incursión de energías renovables en los procesos productivos, haciendo uso de paneles solares, es así como protegemos a la naturaleza y preservamos el medio ambiente siendo conscientes que es un compromiso de todos.



Proquident[®]

*Síguenos en nuestras
redes sociales*



Proquident S.A.



Proquident



Proquident S.A.

www.proquident.com.co